

(주)세원메디텍 의료용시멘트분배기 사용자설명서

- 품목명(형명) : 의료용시멘트분배기 (SWM-4)
- 제조업자 : (주)세원메디텍, 경기도 부천시 원미구 부천로 298번길 33
- 제조업허가번호 : 제 2809 호
- 제조품목허가번호 : 제신 19-1007호
- 유효기간 : 제품(멸균)일로부터 3년
- 제조번호 / 멸균일자 / 제조년월일 : 별도표기(라벨)
- 포장단위 및 포장재 단위
 - 멸균제품 : 1 EA, PE Film / Tyvek Paper Pouch
- 사용목적
 - 수술 부위에 골 시멘트를 주입하는 기구
- 본 제품은 "일회용" "재사용금지" "멸균제품" "의료기기"임
- 사용방법
 - 가. 사용 전 준비사항
 - (1) 겉포장에 부착되어 있는 기재사항의 유효기간을 확인한다.
 - (2) 포장의 파손여부를 확인한다.
 - (3) 개봉 후 제품 외관의 이상 여부를 확인한다
 - 나. 사용방법 및 조작순서
 - (1) SWMVP(의료용 천공기)를 골절된 척추뼈 안에 방향과 위치가 잘 잡히도록 삽입한다.
 - (2) SWMVP(의료용 천공기)의 내부 봉(Needle)을 뺀 후 SWM-1(안내 와이어)를 척추체 중앙까지 위치시킨다.
 - (3) SWM-1(안내 와이어)를 잡고 SWMVP(의료용 천공기)의 외부 관을 뺀 다음 SWM-2(캐놀러)를 삽입시켜 SWM-1(안내 와이어)을 따라 삽입 시킨다.
 - (4) SWM-1(안내와이어)과 SWM-2(캐놀러)의 내부 관(옵츄레이터)를 뺀 후 SWM-3(본 확장기)를 이용하여 시술 공간을 확보한다.
 - (5) 골시멘트를 알맞은 농도로 만든 다음 SWM-4(의료용 시멘트 주입기)에 골시멘트를 넣어 척추체 내부에 낮은 압력으로 밀어 넣어 준다.
- ※ SWMVP, SWM-1, SWM-2, SWM-3은 별도허가제품임.
- 다. 사용 후의 보관 및 관리방법
 - (1) 사용 후에는 의료용 폐기물로서 처리해야 한다(재사용금지).
- 사용 시 주의사항
 - 1) 감염에 주의해야 한다.
 - 2) 일회용이므로 재사용 할 수 없다.
 - 3) 한사람에게만 사용해야 한다.
 - 4) 반드시 전문적인 지식을 가지고 있는 자만 사용해야 한다.
 - 5) 사용법이나 주의사항등 사용에 관한 지침을 숙지한 후 사용해야 한다.
 - 6) 외관 이상 유무 확인해야 한다.
 - 7) 사용에 지장을 주는 상처, 거품, 이물질 및 결함이 없어야 한다.
 - 8) 포장이 훼손된 것은 사용할 수 없다.
 - 9) 사용자가 임의로 제품을 변형하여 사용할 수 없다.